

# INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

## PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO

### TORQUÍMETRO CIRÚRGICO



01



Gire a haste em sentido anti-horário

02



Retire a haste de graduação de torque,  
dividindo o torquímetro em 3 partes

03




**ATENÇÃO**

O Parafuso nunca deve ser retirado

04

Após o desmonte, inicie o processo de lavagem:

- Imergindo as peças em solução aquosa de detergente com Ph neutro ou enzimático e colocá-las no ultrassom por 30 minutos;
- Limpe as peças utilizando uma escova com cerdas macias, detergente e água corrente, esfregando cuidadosamente.

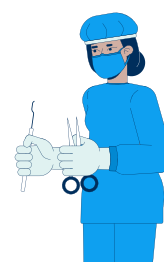

05



O logo da OBL (cabeça), a posição correta é estar alinhada ao mesmo lado da escala (corpo)