

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO

TORQUÍMETRO ODONTOLÓGICO



01



Puxe a haste do inversor de direção para trás.



02

Retire a catraca do encaixe com a cabeça.



03



Rotacione a porca de fixação no sentido anti-horário e retire o eixo central do torquímetro.



04



Retire a haste de graduação de torque.



05



Após o desmonte, inicie o processo de lavagem:

- Imergindo as peças em solução aquosa de detergente com pH neutro ou enzimático e colocá-las no ultrassom por 30 minutos;
- Limpe as peças utilizando uma escova com cerdas macias, detergente e água corrente, esfregando cuidadosamente.